

FAQ-Liste für Hand-Bike-City-7-Gang mit Zahnriemen

Problem		Lösungen
Anbauständer	klappbar	Nicht erforderlich, Ständer so einstellen, das sie neben den Vorderrädern stehen.
Automatikeinraster	für was sind sie da	Zum hochheben der kleinen Rollstuhlvorderräder
Automatikeinraster	öffnet nicht beim hoch drücken	Die Zunge der Automatikeinrasterklappe im "Fahrzustand" bis auf 1-2 mm an den Verriegelungsbolzen drücken
Automatikeinraster	einrasten/öffnen	3 Möglichkeiten - am Griff hoch drücken - den Rollstuhl ankippen - langsam gen eine Wand oder festen Gegenstand fahren
Berguntersetzung	was ist das	Ein in die Kurbel Einheit eingebautes Untersetzungsgetriebe was die Gänge 2,5 fach untersetzt
Berguntersetzung	Schaltstift defekt	Getriebe muss zum Hersteller eingeschickt werden
Berguntersetzung	knarrt	Am oberen großen Kettenblatt befindet sich eine Schlitzschraube -Schraube heraus schrauben und mit einer Einwegspritze in die Öffnung so viel Walzenfett pressen, bis es heraus quillt. -Schraube wieder einschrauben.
Berguntersetzung	setzt über / dreht durch	Prüfen ob das große Kettenblatt nach links und rechts Spiel hat, wenn ja, Lagerspiel der Berguntersetzung(BU) wie folgt einstellen. Silbernen Knopf der BU an der linken Kettenblattseite herausdrehen, die dann sichtbare silberfarbene Mutter anziehen und mit Gefühl etwas lösen. BU-Knopf wieder eindrehen.
Bullhornkurbeln schwarze	lockern sich	Durch das anschweißen des Armes wird Material weich und der Vierkant leiert mit der Zeit aus,
E Fix Antrieb		Beim fahren mit dem Hand Bike dürfen 9 Km/h nicht überschritten werden, auch bei aus geschalteten Motoren. Die Elektronik wird sonst durch den Dynamoeffekt zerstört
Gangschaltung	schaltet nicht einwandfrei	Fahrradhändler aufsuchen, er kann die von Stricker eingebauten handelsüblichen Gangschaltungen normalerweise einstellen
GVR	was ist eine GVR	Sie wird am Rollstuhl angebaut, ist mit zwei Griffen abbaubar, nimmt Schläge auf, federt Unebenheiten ab. Verlängert den Radstand, 10% Steigungen sind so ohne druchdrehen des Hand Bike Rades möglich. Mit speziellen Adapterteilen auch an einen neuen Rollstuhl anzubauen. Je nach Modell in 2 bis 3 Stunden
GRV	federt zu wenig ein	Bei noch größerem Einfederungsweg stellen sich die Rolliräder beim kurbeln V-förmig in Fahrtrichtung auf und bremsen das Gespann tierisch ab.
GRV	federt zu stark ein	Vom Werk aus sind die stärksten Puffer eingebaut. Beim in den Rollstuhl setzen muss die GRV gut einfedern
GVR	Achse ein kürz bar?	Ja, das Achsrohr kann gekürzt werden
GVR	Bremsen am Rollstuhl	Beim versetzen der Rollstuhlräder nach hinten an die GVR verlieren die Bremsen am Rollstuhl ihre Funktion
Hand Bike ankoppeln	bei doppelseitig amputiertem Rollstuhlfahrer	Rolli mit abnehmbaren Fußstützen 90 mm Augenschrauben oder extra verlängerte zur Befestigung der Automatikeinraster verwenden.
Heim-Trainer		Wird in der Wohnung aufgestellt und ist für das Training im Winter gedacht. Radgröße bei Bestellung angeben.
Hilfsmittelnummer	für was notwendig	Für Produkte mit einer Hilfsmittelnummer übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Das ELD Bike hat eine HM Nr
Jugendausstattung	was ist das	City Model welches auf Jugendliche und Personen bis 1,50 m Körpergröße abgestimmt ist.
Hand Bike ankoppeln	ohne Hilfe möglich	In 10 Sekunden von geübten Bikern, Tetras ist es auch selbstständig möglich

FAQ-Liste für Hand-Bike-City-7-Gang mit Zahnriemen

Problem	Lösungen
Kurze Kurbeln	An allen Hand Bikes möglich
Kettenantrieb Kleidungsverschmutzung	Teflonröhrchen schützt die Kette, dadurch keine verschmutzte Kleidung
Kurbelverbreiterhülse für was	Damit kann die Kurbelposition um 6 bzw. 12 cm verbreitert werden
Langlochverschiebung	zur Einstellung der Automateinraster, für Händler und Außendienstler zur schnellen Hand Bike Anpassung gedacht
Lok-Stopp Rolli Räder	Lok-Stopp Räder werden zum umsetzen der Rolli-Räder bei der GRV benötigt, wenn keine Hilfsperson zur Verfügung steht. Sie werden in der Nabe gebremst.
Magic Power nachrüstbarer E-Motor	Nicht für Zahnriemenantrieb nachrüstbar
Positionsklemmen Fix was bewirken diese	Sie werden am Rollstuhl angebracht und gewährleisten die immer gleiche Anklemposition
Powerstütze Zweck der Stütze	Es ist eine extra Abstützung des Steuerrohrs, die mit zwei Handgriffen montierbar ist. Für besonders kräftige Biker geeignet
Rollstuhl Model extra Rollstuhl erforderlich	Nein; Stricker Hand Bikes sind an fast jeden Rollstuhl ohne Umbauten adaptierbar
Rücktrittbremse an welchen Hand Bikes ist eine Rücktrittbremse möglich	An allen mit Ketten- oder Zahnriemenantrieb
Rückwärtsgang bestellbar	ja
Tachometer keine Anzeige bzw nur Uhrzeit	-Keine Anzeige Batterie wechseln - Wenn nur Uhrzeit erscheint, wie folgt vorgehen: Tacho richtig auf den Halter stecken Magnetgeber und Sensor am Rad auf max. 1-3 mm Abstand einstellen Federschuhe am Halter (Gegenstück vom Tacho) auf richtigen Sitz prüfen wenn das nicht zum Erfolg führt, ist das Kabel defekt und es muss ein neuer Tacho angebaut werden.
Gangschaltung Nabe leichter Ölaustritt	Ohne Bedeutung
Vorderräder des Rollis berühren den Boden	- sind Automateinraster richtig eingerastet, - Bike so tief wie möglich am Rolli anklammern, - Augenschrauben an den Automateinrastern reinschrauben, - Augenschrauben am Flacheisen mit den drei Gewindebohrungen weiter zur Klemme hin anschrauben - durch extra Winkelstücke können Automateinraster so Angebracht werden, dass das Gespann mehr geknickt wird und die Vorderräder mehr angehoben werden können
Vorderräder des Rollis sind zu hoch vom Boden	- Halteklammern höher am Rolli ansetzen - Augenschrauben an den Automateinrastern mehr Herausdrehen - 60 mm Augenschrauben gegen 90 mm Augenschrauben auswechseln - Augenschrauben am Flacheisen mit den drei Gewindebohrungen weiter zum Vorderrad hin anschrauben
Zahnriemen gibt es verschiedene Längen	Ja, im Zubehörkatalog enthalten
Rücktrittbremse schlägt, Leerweg groß	Vorhandenes Ritzel gegen Esjot Ritzel mit dickerem Fett austauschen
Rücktrittbremse überspringt beim bremsen	Schaltknopf der Berguntersetzung richtig einstellen
Schieberohre längere Schieberohre	Ab 1996 sind alle Schieberohre gleich (die mit dem Alu

FAQ-Liste für Hand-Bike-City-7-Gang mit Zahnriemen

Problem	Lösungen
	Gelenk) IN allen Hand Bikes können auch die 30 cm langen Schiebrohre vom Lomo 360 eingebaut werden.
Schutzhelm ist das tragen vorgeschrieben	Nein, wie beim Fahrradfahrer empfohlen
Umkippen	Bei Kurvenfahrt mit dem Körper in die Kurve legen Umkippen des Hand Bikes nach hinten wegen des Bikes so gut wie ausgeschlossen
Vorführungen werden Hand Bikes Vorführungen gemacht	Ja, näheres bitte in Bühl erfragen
Zahnriemen setzt über/ist lose	Klemmschraube der Alu-Spannhülse unter dem Steuerkopf lösen. Schraube vom Steuerkopf lösen (so das die Steuerkopf-stange gelöst wird) Spannhülse verdrehen, bis die beiden Zahnriemenstränge sich nur nach 1 -2 cm eindrücken lassen. Klemmschraube anziehen. Steuerkopfschraube wieder anziehen.