

FAQ-Liste für Hand-Bike-Lomo / Lomo 360°

Problem		Lösungen
Automatikeinraster	für was sind sie da	Zum hochheben der kleinen Rollstuhlvorderräder
Automatikeinraster	einrasten/öffnen	3 Möglichkeiten - am Griff hoch drücken - den Rollstuhl ankippen - langsam gegen eine Wand oder festen Gegenstand fahren
Automatikeinraster	öffnet nicht beim hoch drücken	Die Zunge der Automatikeinrasterklappe im "Fahrzustand" bis auf 1-2 mm an den Verriegelungsbolzen drücken
Positionsklemmen Fix	was bewirken diese	Sie werden am Rollstuhl angebracht und gewährleisten die immer gleiche Anklemposition
Rollstuhl Model	extra Rollstuhl erforderlich	Nein; Stricker Hand Bikes sind an fast jeden Rollstuhl ohne Umbauten adaptierbar
Schutzhelm	ist das tragen vorgeschrieben	Nein, wie beim Fahrradfahrer empfohlen
Umkippen		Bei Kurvenfahrt mit dem Körper in die Kurve legen Umkippen des Hand Bikes nach hinten wegen des Bikes so gut wie ausgeschlossen
Vorfürungen	werden Hand Bikes Vorfürungen gemacht	Ja, näheres bitte in Bühl erfragen